

OMRON

# Life is connect

つながりのある人生が、好きだ。

あなたの未来のために、アプリを使って健康管理。

「OMRON connect」は、Appleヘルスケアやその他健康管理アプリにもつながります。



スマートフォンで  
管理しよう！




iPhone／Androidスマートフォン向けの新健康管理アプリとして、  
当社の健康医療機器で測定したデータの管理ができるとともに、  
さまざまな健康・医療関連の他社のアプリケーションとオープンにデータ連携が可能な  
「OMRON connect(オムロン コネクト、以下オムロン コネクト)」を、  
2016年11月1日から日本で提供開始しました。

スマートフォン画面イメージ



ホーム画面 (イメージ)

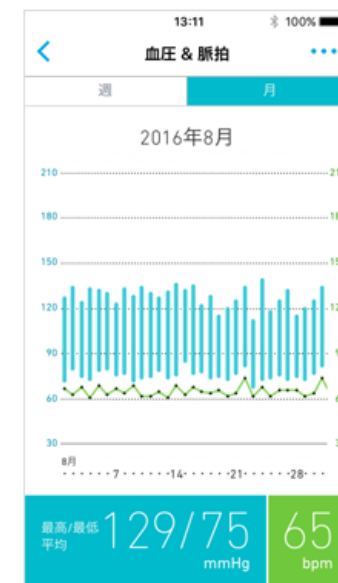

血圧・脈拍 月間グラフ  
© Copyright OMRON HEALTHCARE Co.,Ltd.



**はかる。気づく。変えていく。  
そんな好循環を世界中に。**

たとえば、ウォーキングの成果が体重の変化に現れたときの達成感。測った結果を次の行動につなげる。そんな好循環を世界中に広げていきます。

毎日のデータを積み上げ、  
照らし合わせることで、  
見えてくる変化。

血圧、体重、体脂肪率、歩数……測り続けることで、変化が見えてくる。



私たちは、信頼できるデータを簡単に記録する。毎日測り続けるためのサポートをしていきます。



## ■ 概要

- OMRON機器のデータを簡単に転送でき、手軽に健康管理ができます
- さまざまなアプリとつながり、ユーザーが自由にサービスを選べます

## ■ 提供価値

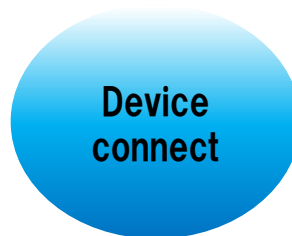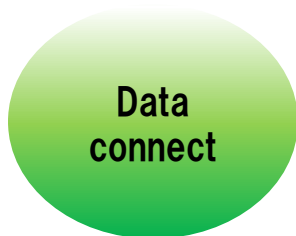

### ① Device Connect:


会員登録無しに機器を簡単に接続/データ転送することができます

### ② Viewer:

ローカルアプリでデータの統合管理ができます

### ③ Service Connect:

自由にサービスを選択することができます

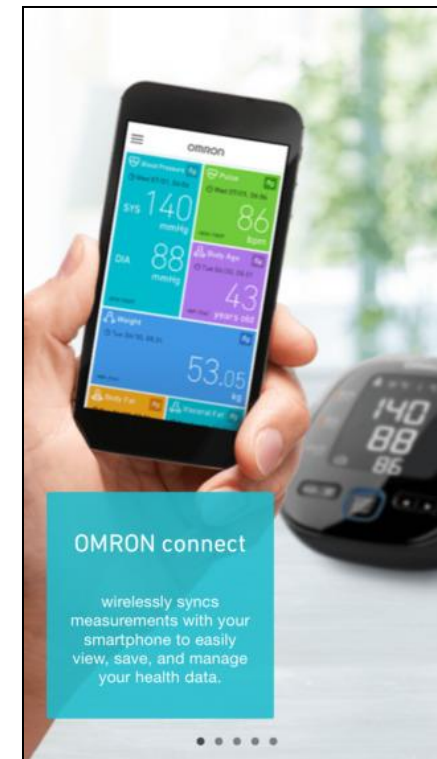


## 会員登録なしに、簡単に接続/データ転送することができます




## ➤ ホーム画面(ダッシュボード&パネル)

レイアウトは機器の最新データを全て一画面で見れるダッシュボードを採用しています。

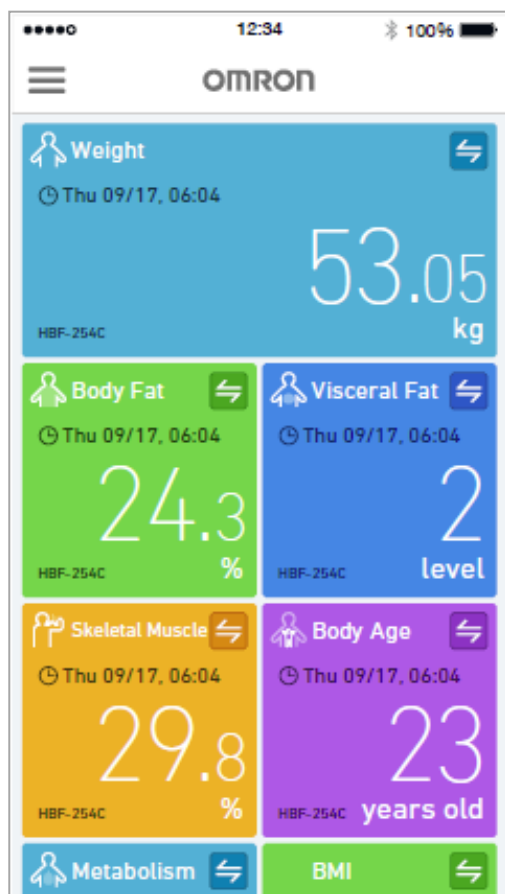

データを表示するパネル色の彩度でデータの新鮮さを表現し、機器との通信を促します。

- **ホーム画面 一括データ転送(Pull to Refresh)**  
ホーム画面を引き下げる動作で、登録している機器をまとめて繋ぎデータ転送をおこないます。

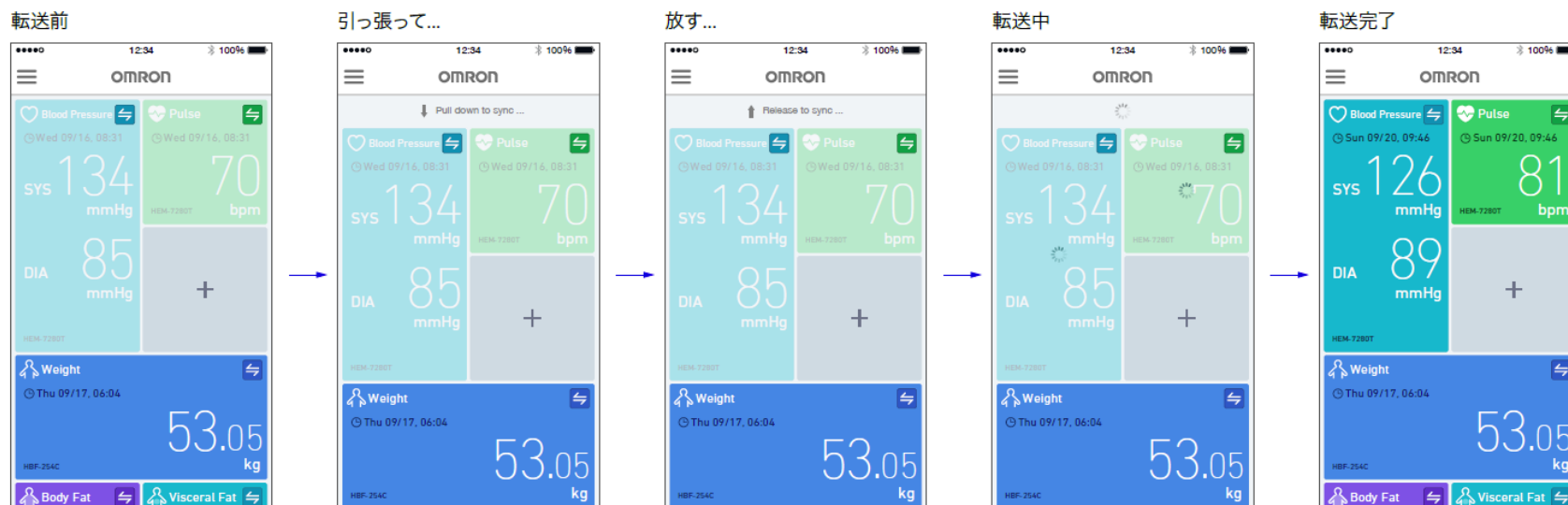

近くでアダプタイズ中の機器を一括で探して繋がります



## ➤ ホーム画面 個別データ転送

パネル右上のデータ転送ボタンをタップすると、その機器個別のデータ転送をおこないます。




機種を指定して、アドバタイズ中の機器を探して繋がます



## ➤ パネルの種類

登録した機器に応じて、ホーム画面に追加される指標パネルが異なります。


- 「**血圧計**」を登録すると  
以下のパネルが追加。
- ・最高血圧/最低血圧
  - ・脈拍

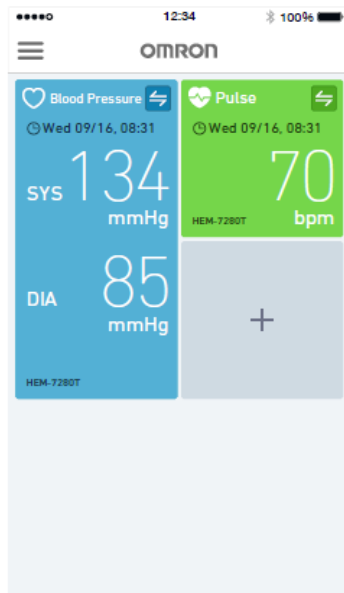

- 「**歩数計**」を登録すると  
以下のパネルが追加
- ・歩数
  - ・距離
  - ・消費カロリー
  - ・しっかり歩数



- 「**体重体組成計**」を登録すると  
以下のパネルが追加
- ・体重
  - ・体脂肪率
  - ・骨格筋率
  - ・総消費カロリー
  - ・内臓脂肪レベル
  - ・体年齢
  - ・BMI

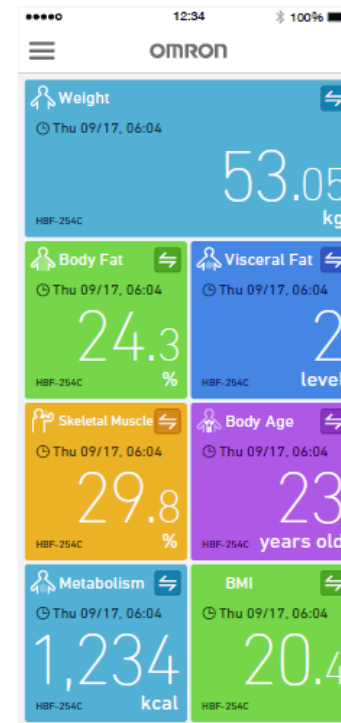

※複数機種登録すると、それぞれのパネルが順に追加されます。

## ➤ グラフの種類


ホームのパネルをタップすると、その指標のグラフを確認できます。

### 血圧計グラフ

期間: 週、月、年  
種類: 棒+折れ線

平均グラフ

指標: 最高/最低血圧+脈拍

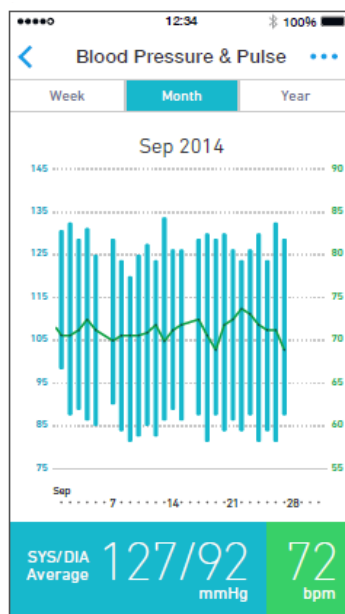


### 歩数計グラフ

期間: 日、週、月、年  
種類: 棒

平均グラフ

指標: パネルの4指標全て

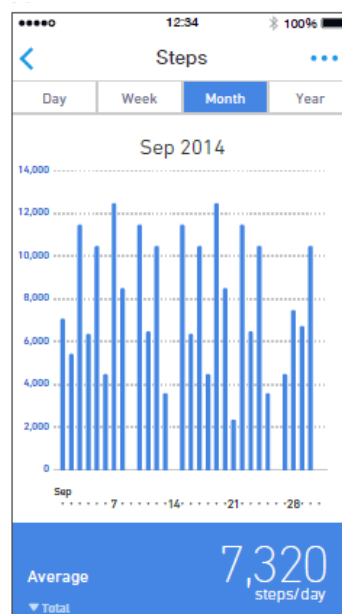


### 体重体組成計グラフ

期間: 日、週、月、年  
種類: 折れ線

平均グラフ\*

指標: パネルの7指標全て

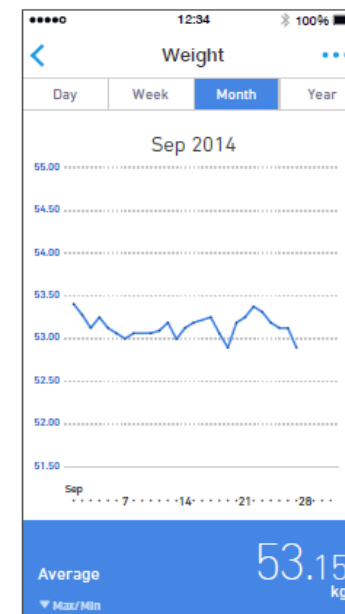

グラフの期間を切り替えて、日内変動や曜日変化、中長期的な変動を確認する。

## OMRON connect (オムロンコネクト)


### 毎日の測定データを、可視化する。

BT通信機器を搭載したオムロンのオムロンコネクト対応機器と、スマートフォンアプリ「オムロンコネクト」を使えば、簡単に毎日の測定データを管理できます。

会員登録不要。データはご自身のスマホ端末に蓄積されるので、簡単に安心してお使いいただけます。



お使いの機器で転送されたデータは、すべて一画面で確認できます。

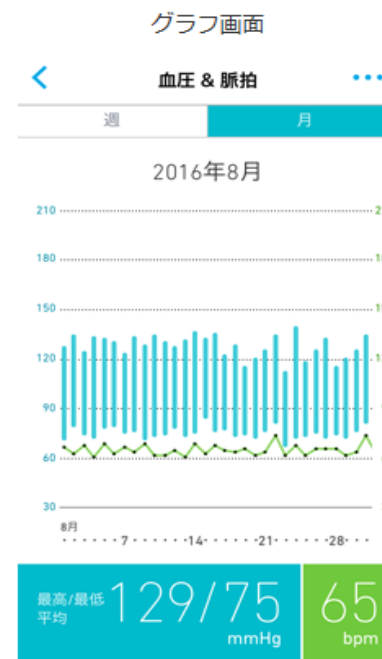

パネルをタップすると、その指標がグラフで表示されます。

「OMRON connect」で管理することができる、上腕式血圧計の「HEM-7511T」、「HEM-7325T」、「HEM-7281T」、「HEM-7271T」、手首式血圧計の「HEM-6324T」、「HEM-6323T」を11月1日から発売しています。



HEM-7511T



HEM-6324T

オムロンコネクは、多様なサービス展開に活用いただけるプラットフォームです。血圧や歩数など、オムロンコネクで管理できる健康情報をアプリ間連携、クラウド連携で、簡単に活用いただけます。

血圧計

体重  
体組成計

活動量計



## Android アプリ間連携

参照 → 連携先

## iPhone アプリ間連携

Apple ヘルス ← 参照 → 連携先

## クラウド間連携



## 2016年11月より連携予定



「ヘルスケア」

(Apple社提供)



「Welby マイカルテ」

(ウェルビー社提供)



「ポケットドクター」

(OPTiM社提供・開発)



「curon (クロン)」

(情報医療社提供)



「PepUp」

(日本医療データセンター社、ヘルスデータ・プラットフォーム社提供)



「HEALTHPLAYER」

(Practechs社提供)

## 2017年1月以降連携予定



「あすけん」

(ウィット社提供)



「CARADA」

(エムティーアイ社提供)



「コロナピ」

(クオリア社提供)



「ippo-ippo ヘルレコ (仮称)」

(SOMPO リスケアマネジメント社提供)



「DiP2S (ディップス)」

(ダックケーブル社提供)



「Noom (ヌーム)」

(Noom社提供)



「RenoBody (リノボディ)」

(ネオス社提供)



「ヘルスアップ WEB」

(健康情報管理支援サービス)

(ベストライフ・プロモーション社提供)



「Mealthy (メルシー)」

(Mealthy社提供)



「カロミル」

(ライフログテクノロジー社提供)

下記にてお問い合わせください

<http://www.telehealth.omron.com/jp/>

OMRON All for Healthcare

日本語 English

OMRON Connected Device Developer Center

Contact

HOME Telehealth製品 OMRON connect App 比較表

▶ 接続検証済み スマートフォンリスト

## Telehealth Device

直接つながる製品のご紹介

- Bluetooth SIG に準拠した製品
- サンプルデータなどが入った“StarterKit”を無償提供

さらに詳しく ▶

## OMRON connect App

専用アプリを利用してつながる製品のご案内

- Omron connect アプリで簡単にデータ転送・管理
- 御社のアプリに、とても簡単に導入できます

さらに詳しく ▶