

口臭測定器(プレストロン)使用についてのお願い

口臭測定器(プレストロン)は、精密機械です。

そのため、一定期間使用した後点検に出さなければなりません。

点検に出す目安(400~450回)として、使用回数を確認することとなりました。

お手数ですが、ご協力のほどお願いいたします。

連絡方法は、お電話で(0852-24-2725)まで返却日にご連絡いただくかもしくは、下記の使用者名および使用回数等を記入欄にご記入の上、(0852-31-0198)までFAXにて送信してください。

使用者名 所属機関名(学校名)	
--------------------	--

使用回数	回
------	---

● ご使用上の注意(必ず確認してください)

- 1 口臭測定器(プレストロン)は専用マウスピースを購入の上、ご使用ください。
測定ごと(被験者ごと)にマウスピースは交換してください。
1つのマウスピースの使いまわしによる使用は、測定に際し異常値を表示する原因となります。

【マウスピース購入について】		
商品名	プレストロンマウスピース50個入り	6,600 円
	(消費税を含まず)	

※専門の業者を通じて販売される商品となります。

学校で使用される場合には、学校歯科医の先生に相談されることをお勧めします。

- 2 貸し出し用の機器のため、長期間電源コードが抜かれている状態にあります。
そのため、使用する2時間前には電源を入れてから、ご使用ください。

3 故障の場合について

返却された口臭測定器(プレストロン)に不具合があれば修理に出さなくてはなりません。

業者からの修理報告書により、使用方法に問題があって生じた不具合であることが確認された場合、貸し出した先に修理にかかる費用を請求させていただく場合がございますので、予めご了承くださいませよう、お願いいたします。

※口臭測定器(プレストロン)到着時に機械の動作状況を確認してください。

なお、到着時点で機器の不具合を発見された場合は、その時点で必ず島根県歯科医師会までご連絡ください。